


Pflegeempfehlung

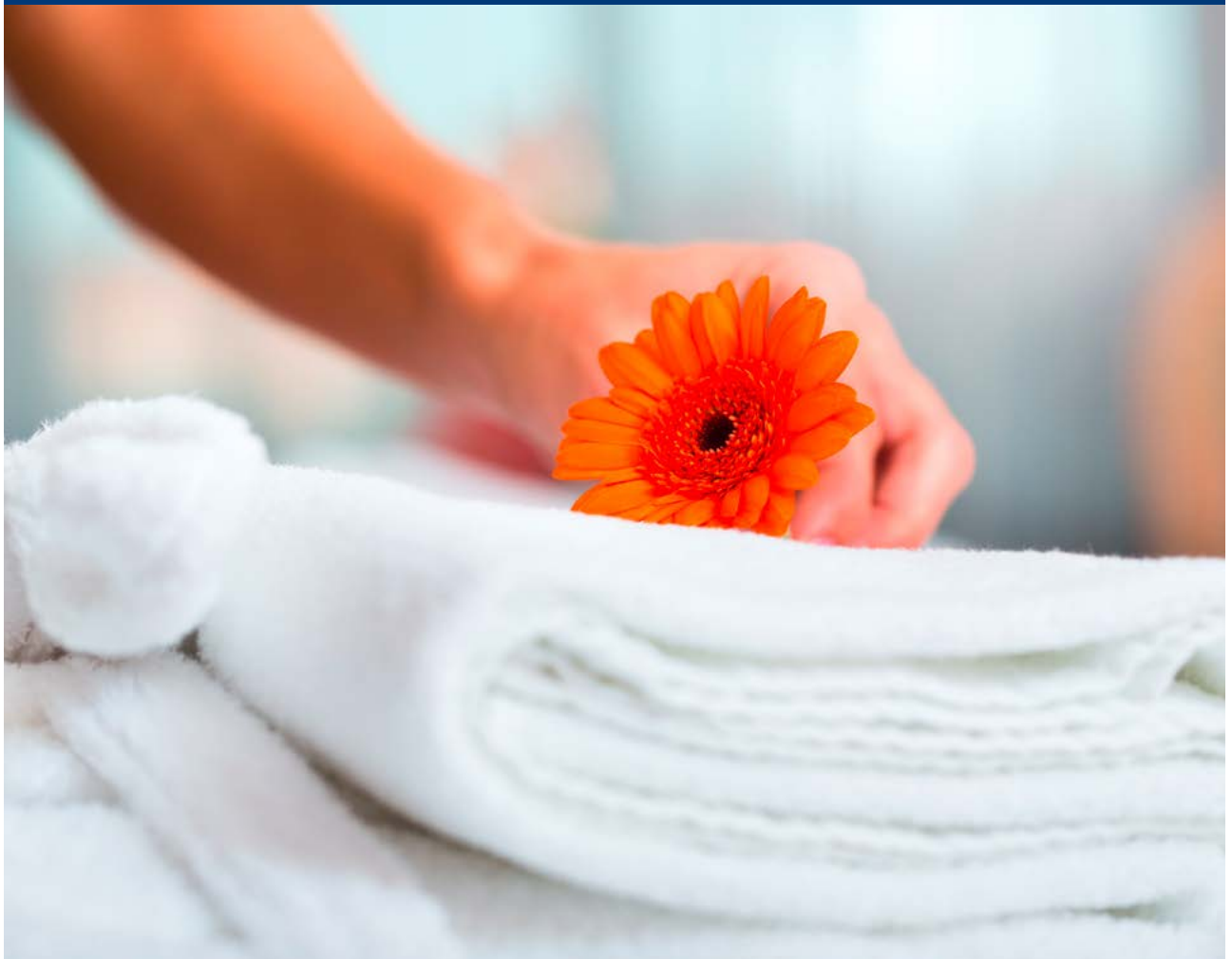

Material:

Kunstleder / PVC / Wachstuch / PU-Stoff / Nylonspezialgewebe / PU- sowie PUD-Beschichtung/dicht

Alle aufgeführten Materialien sind mit Flächendesinfektionsmitteln zur Sprüh- und Wischdesinfektion zu desinfizieren. Eine Auswahl VAH gelisteter Produkte entnehmen Sie der unten aufgeführten Tabelle. Die Angaben beruhen auf Herstellerempfehlungen und Eigentests.

Hersteller	Mittel
Ecolab	Incidin Oxy Foam & Oxy Wipe, Incidin Oxy FoamS & Oxy WipeS
B. Braun	Meliseptol Foam Pure, Meliseptol Tücher
Dr. Schumacher	Descosept Spezial Wipes
Bode Chemie GmbH	Mikrobac Tissues Desinfektionstücher

Wir empfehlen aldehydfreie Produkte auf Basis oberflächenaktiver Wirkstoffe, zur Schonung der empfindlichen Oberflächen. Diese sind gemäß dem jeweiligen Gebrauchshinweis des Herstellers zu verwenden.

Für die Anwendung aldehydhaltiger Produkte übernehmen wir keine Gewährleistung der dauerhaften Haltbarkeit der Oberflächen.

Material:

Schaumstoff blank

nicht desinfizierbar, nur als Einmalprodukt zu empfehlen

Dampfsterilisation bis 120°C sowie Gassterilisation
Die Angaben basieren auf Praxiserprobungen sowie Erfahrungen unserer Lieferanten.

NEU

Incidin-Oxy Produkte neu unter Kapitel 14
Desinfektion zum Sprühen und Wischen