

## Pflegeempfehlung



Material:

**Kunstleder / PVC / Wachtuch / PU-Stoff / Nylonspezialgewebe / PU- sowie PUD-Beschichtung/dicht**

Alle aufgeführten Materialien sind mit Flächendesinfektionsmitteln zur Sprüh- und Wischdesinfektion zu desinfizieren. Eine Auswahl VAH gelisteter Produkte entnehmen Sie der unten aufgeführten Tabelle. Die Angaben beruhen auf Herstellerempfehlungen und Eigentests.

Hersteller	Mittel
Ecolab	Incidin Oxy Foam & Oxy Wipe
B. Braun	Meliseptol Foam Pure
Dr. Schumacher	Descosept Spezial Wipes
Bode Chemie GmbH	Mikrobac Tissues Desinfektionstücher

Wir empfehlen aldehydfreie Produkte auf Basis oberflächenaktiver Wirkstoffe, zur Schonung der empfindlichen Oberflächen. Diese sind gemäß dem jeweiligen Gebrauchshinweis des Herstellers zu verwenden.

Für die Anwendung aldehydhaltiger Produkte übernehmen wir keine Gewährleistung der dauerhaften Haltbarkeit der Oberflächen.

Material:

**Schaumstoff blank**

nicht desinfizierbar, nur als Einmalprodukt zu empfehlen, bei mehrmaligem Gebrauch mit Einmal-PE-Folie abdecken oder Schutzbezug verwenden.

Dampfsterilisation bis 120°C

Die Angaben basieren auf Praxiserprobungen sowie Erfahrungen unserer Lieferanten.

**Kunstleder** bis max. 100 °C autoklavierbar.

**PVC** nicht autoklavierbar.

Mikroporöse Oberflächen sind nicht blutfest! Kontaminierte Oberflächen mit einem Antioxidans wie Natriumthiosulfat reinigen. Oder bei möglicher Kontamination mit Blut mit Einmal-PE-Folie abdecken.

**Wiederverwendbare Produkte** sind stets auf Haltbarkeit und Stabilität zu prüfen und ggfs. auszutauschen, in jedem Fall aber nach der Gewährleistungszeit.